


Wöhlk RGP Multi

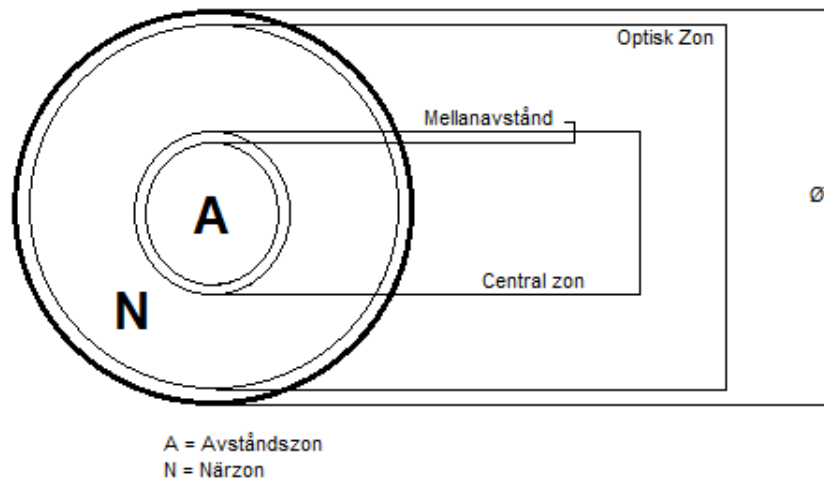


Center Distance, alla zoner (Avstånds, När, Mellan och Optisk Zon) kan tillpassas individuellt i styrka och storlek.

Central Zon (ZZ) 3,00 mm till 4,50 mm i 0,1 steg

Standard ZZ 3,8 mm

Mindre ZZ (pupill < 2,5 mm) 3,3 mm

Avståndsseende

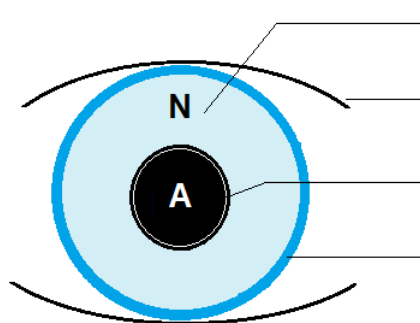


Närseende

Kontaktlinn

Ögonlock

Pupill

Iris


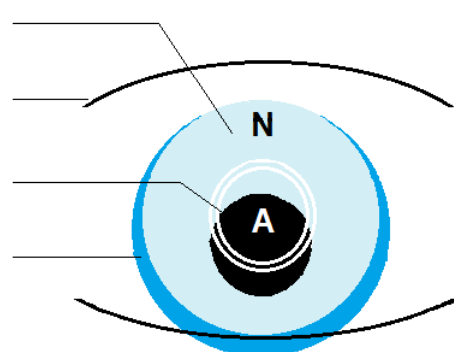


Radier: 6,50 till 9,50 i 0,05 steg (RT/BT från 6,00)

Ø: 8,80 till 11,00 i 0,10 steg

Sfärisk styrka: -25,00 till +25,00 i 0,25 steg

Addition: +0,75 till +2,75 i 0,25 steg

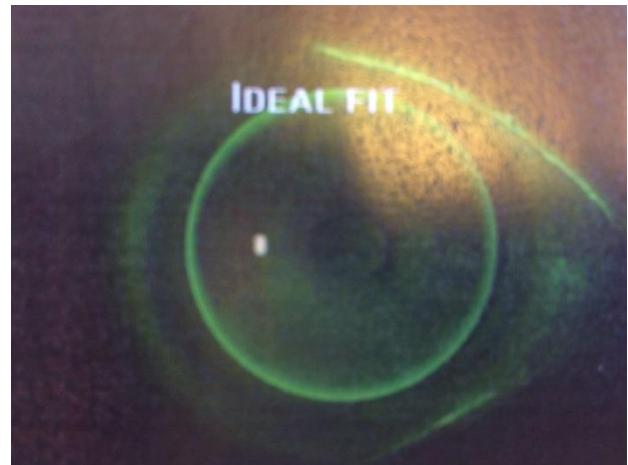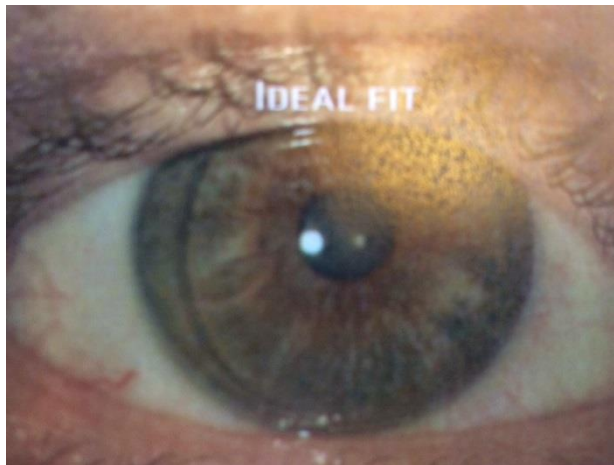

Radie:

Tillpassas parallellt med flataste K-värde (vid radie differens > 0,4 fundera på RT)

∅:

Hornhinnediameter – ca 1,5 till 2,0 (något större ∅ än normal RGP tillpassning).

Exempel:

K-värden 8,00 i 0° / 7,80 i 90°

HH 11,8

Första lins 8,00 / 10,30

Lite mindre rörelse än normala RGP, därför större ∅. Kan även behöva minska radie och/eller Excentricitet (Ecc).

Finns i materialen:

Wöhlk:		Boston:		Paragon:	
CFA	Dk: 52	ES	Dk: 18	HDS Thin	Dk: 29
A90	Dk: 90	EQ	Dk: 47	HDS 60	Dk: 58
CFA 100 UV	Dk: 100	EO	Dk: 58	HDS 100	Dk: 145
ASF 120	Dk: 120	XO	Dk: 100		

Vid beställning, skicka till ExpertOptik

K-värden

Ecc:

Refraktion

Addition

HH ∅

Pupill ∅

Material (börjar med CFA / A90)

Gärna även topografi